

**MANI**®

FOR ADVANCED TREATMENT

# SUPER FILES



**MANI, INC.**






For advanced treatment ——— We serve with micro processing technology


医療機器承認番号 22000BZX01626000  
管理医療機器 一般的名称: 電動式歯科用ファイル  
販売名 マニースーパーファイル

# SUPER FILES

## スーパーファイル (ツイストコントラ用フレキシブルファイル)

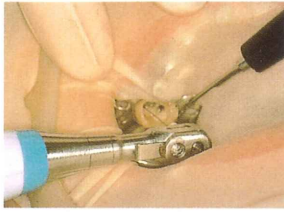

パルス振動を歯に与えながら、コードレスのツイストコントラを用いて浅く根管に挿入して、少しでもファイルの先が狭まった感じが手に伝わった時点でゆっくり引き上げます。その後は、同様に軽いタッチでファイルを引き上げる操作を繰り返します。

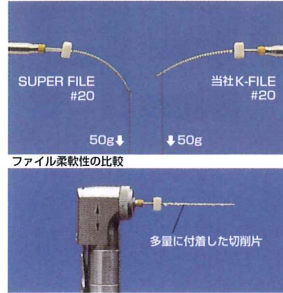


SUPER FILESは、フレキシビリティの高いファイルですので、当社Kファイルよりも湾曲根管への追従性は向上しております。また、SUPER FILESは、自社開発の「マニー・ハードファイバー・ステンレス・スチール」を採用しております。この線材は、折れ難さと強さを追求したMANI独自のステンレス スチールです。

SUPER FILESは、パルス切削法を応用することにより、刃部の全体を同時に作動させながら根管形成を行いますと一度に多量の切削片が削り取るために、効果的な根管洗浄を必要とします。

<資料提供>  
東京都千代田区開業  
初谷歯科医院  
院長 初谷宏一先生

### SUPER FILES

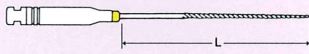

作業部長(L) : 18,21,25mm  
最小包装単位 : 6本入/ケース  
アソート : 15~40

サイズ	シャंक溝数	サイズ	シャंक溝数	サイズ	シャंक溝数
10	-	30	4	50	2
15	1	35	5	55	3
20	2	40	6	60	4
25	3	45	1		

デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。


■標準価格 (6本入/ケース) ・スーパーファイル #10~#60.....2,400円



**注意** スーパーファイルのご使用に際して ●本製品を歯科治療以外の目的には使用しないで下さい。●感染防止の為、使用前に必ず滅菌処理を行って下さい。●ハンドピースメーカーの指示に従って、シャंकを確実に奥まで挿入し、半チャックでないこと、また予め患者の口腔外で変形・キズ・ヒビが無いことを確認して下さい。●予め患者の口腔外で回転させて振れないことを確認し、無負荷で回転させ、定常回転となってからご使用下さい。●本製品は、ツイストコントラヘッドに装着して使用して下さい。また、破折の原因となりますので、最高許容回転数800r.p.m.を厳守して下さい。●ご使用後は、医療用廃棄物として適切な処理をして下さい。

## Access Opening 専用ダイヤバー

医療機器届出番号 09B1X00006002010  
販売名 マニーダイヤバー

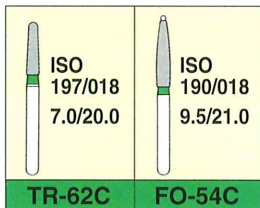

30万回転 300,000 r.p.m.




■標準価格 (5本入/シート)  
・マニーダイヤバー (F.G.)  
.....3,000円



**注意** FGダイヤバーご使用に際して ●本製品を歯科治療以外の目的には使用しないで下さい。●感染防止の為、使用前に必ず滅菌処理を行って下さい。●ハンドピースメーカーの指示に従って、シャंकを確実に奥まで挿入し、半チャックでないこと、また予め患者の口腔外で回転させて振れないことを確認し、無負荷で回転させ、定常回転となってからご使用下さい。●破折防止のために、力を加え過ぎない様に注意し、フェザータッチで断続的に使用して下さい。特に頭部の細い・長い大きい形状のものは、折れたり曲がったりする可能性がありますので、充分にご注意下さい。●ご使用の際には目の損傷を防ぐ為、保護眼鏡等をご使用下さい。●ダイヤバーの性能維持・目詰まり防止・菌感染防止の為、必ず充分な注水下でご使用下さい。●ご使用後は医療用廃棄物として適切な処理をして下さい。●破折の原因となりますので、指定回転数を厳守して下さい。最高許容回転数 (カタログ背景色) は以下の通りです。

45万回転 450,000r.p.m. 30万回転 300,000r.p.m. 16万回転 160,000r.p.m.

## ファイルクリーナー

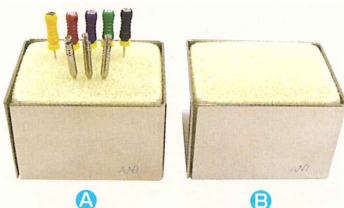

- ① 1人1人の患者さんに滅菌済ファイルクリーナーを2個づつ用意します。
- ② 使用する毎に(B)のファイルクリーナーのスポンジで上下にしごきながらファイルについた汚れを落します。(一度使ったファイルは、決して(A)の箱の方に戻しません)
- ③ 治療が終了した時点で汚れた(B)のファイルクリーナーのスポンジのみをはずして廃棄します。(スポンジのみ使い捨て)
- ④ その後再びスポンジをつけて診療予定分のファイル及びリマを準備し滅菌します。

■標準価格 (2個入)  
・ファイルクリーナー (スポンジ付)  
.....4,000円

製造販売 **MANI**  
MANI, INC. マニー株式会社

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8-3 Tel:028-667-1811(代)  
【歯科営業】Tel:028-667-8591/Fax:028-667-8593  
Exp.Sec./Phone:028-667-8592 Telefax:028-667-8596 URL:http://www.mani.co.jp

発売 株式会社モリタ

大阪本社 ■ 〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3丁目33番18号 Tel:06-6380-2525  
東京本社 ■ 〒110-8513 東京都台東区上野2丁目11番15号 Tel:03-3834-6161