


サージカルバー

医療機器届出番号 Q9B1X00006003010
 一般医療機器 一般的名称：歯科用カーバイドバー
 販売名 マニーカーバイドバー

					
1.00 25.00	1.00 28.00	2.00 25.00	2.00 28.00	4.00 25.00	4.00 28.00
25mm #2 001/010	28mm #2 001/010	25mm #330 232/008	28mm #330 232/008	25mm #1557 137/010	28mm #1557 137/010

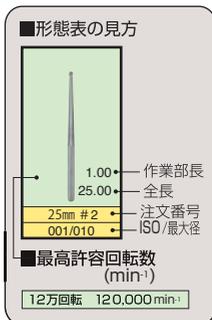

メタルポスト
 メタルコア
 ファイバーコア
 などの除去に効果を発揮

ロングテーパーであるため視野の確保が可能

半チャックで使用していた悩みを解決

〈症例提供〉
 東京都四谷開業
 澤田デンタルオフィス 澤田則宏先生



①通常カーバイドにて切削除去



②深い部位に残ったメタルを、通常の長さのバーで除去することは困難。



③サージカルバーを用いることで、容易にアクセス、除去が可能に。視野も確保され、半チャック使用によるタービン破損も軽減されます。

One Point

12万回転以下で
 5倍速(マイクロモーター)
 などを使用すること。

