

MANI®

MANI® Trocar Kit


Trocar
Infusion Cannula
Kit



MANI® Trocar Kit

□ Trocar トロカール+バルブ付カニューレ

原寸サイズ

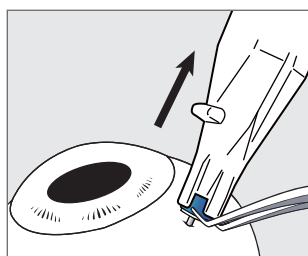


■カニューレを押さえる場合

本製品は強膜穿刺後ブレードを引き抜く際、基本的にバルブ付カニューレを押さえることなく強膜上に留置することが可能です。カニューレがブレードから外れにくい場合は、左図のように柄の先端にある爪を避けて撮子先端でバルブ部分のみを軽く押さえながらブレードを引き抜いてカニューレを留置してください。

滑らかな穿刺と一文字切開を実現するブレードに、リークを抑えた改良型クロージャールバルブを組み合わせました。単品販売のため、バックアップ等にも最適です。

品名	入数	ハンドル印字色	品番
トロカール 25G S	6本 / 箱		MTR25S
トロカール 23G S	6本 / 箱		MTR23S

□ Infusion Cannula インフュージョンカニューレ

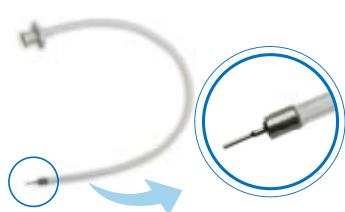

バルブ付カニューレに接続した状態

品名	入数	品番
インフュージョンカニューレ 25G S	6本 / 箱	MIC25S
インフュージョンカニューレ 23G S	6本 / 箱	MIC23S

クロージャールバルブの上から差し込むタイプのインフュージョンカニューレです。単品販売のため、バックアップ等にも最適です。

□ Kit トロカール+バルブ付カニューレ / インフュージョンカニューレのキットパック



品名	入数	品番
トロカールキット 25G S	1症例分×3パック / 箱	MTK25S
トロカールキット 23G S	1症例分×3パック / 箱	MTK23S

トロカール+バルブ付カニューレ×3本とインフュージョンカニューレ×1本を、1症例分としてセットにしたタイプです。

販売名	マニートロカールキット
一般的名称	単回使用眼科手術用チューブ付カニューレ
医療機器認証番号	22100BZX00859000
医療機器のクラス	管理医療機器(Ⅱ)

STERILE EO
Ⓢ 再使用不可

ご使用前に必ず添付文書をお読みください。

<http://www.mani.co.jp> E-mail: seg-dms@ms.mani.co.jp

販売店名 / Distributed by

製造販売元

MANI
MANI, INC. マニー株式会社

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8-3
お問い合わせ先 TEL 028-667-9911
FAX 028-667-6177

8-3 KIYOHARA INDUSTRIAL PARK, UTSUNOMIYA, TOCHIGI, 321-3231, JAPAN
Phone: +81-28-667-7565 Fax: +81-28-667-6177 S00530(1612)

デザイン・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。