












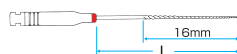
スーパーファイル

医療機器認証番号 22000BZX01626000
 管理医療機器 一般的名称：電動式歯科用ファイル
 販売名 マニースーパーファイル

■最小包装単位：6本入/ケース ■アソート(ASS)：#15～40 ■材質：ステンレススチール ■テーパ：2/100

サイズ	先端径 (mm)	
10	0.10	
15	0.15	
20	0.20	
25	0.25	
30	0.30	
35	0.35	
40	0.40	
45	0.45	
50	0.50	
55	0.55	
60	0.60	

■ 作業部長 (L)



L=18mm,21mm,25mm

■ 使用方法

ツイストコントラヘッドに装着し、許容回転数 800min⁻¹ 以下で使用



ゆっくり
引き上げ

■ 刃部拡大図



■ 横断面形状



■ 用途

根管拡大形成などに使用

パルス切削法

パルス振動を歯に与えながら、ツイストコントラを用いて浅く根管に挿入し、少しでもファイルの先がロックされた感じが手に伝わった時点でゆっくりと引き上げます。その後は、同様に軽いタッチでファイルを引き上げる操作を繰り返し、形成を行います。

刃部の全体を同時に作動させながら根管形成を行いますと一度に多量の切削片が削り取られる為に、**効果的な根管洗浄を必要とします。**

弯曲根管への対応

スーパーファイルは、柔軟性の高いファイルですので、当社Kファイルよりも弯曲根管への追従性は向上しております。

ファイル柔軟性の比較



● ● ● 関連商品 ● ● ●

手用タイプは…

フレキシブルファイル 標準価格 (6本入) P 18

■ 標準価格 (6本入)

#10~60

¥2,650