

MANI

MI ステンレスバー ステンレスバー ハード

MI STAINLESS BURS / STAINLESS BURS HARD

Healthy teeth, happy smiles,
to the world.




サビを気にせずオートクレーブ可能! 衛生面向上! サビによる様々な悩みを解消!

サビに強い材質のため、サビの発生リスクを抑え消毒のみとなっていた悩みを解消。また、サビによるコントラの損傷、患者様へ使用する際の抵抗感が軽減されます。また、拡大視野下でも見やすいネック形状となっています。

サビによる悩みを解消

自社高圧蒸気滅菌試験【材料比較】

滅菌前 10サイクル

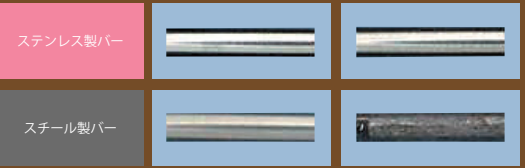

MI 重視

MI STAINLESS BURS MI ステンレスバー

軟化象牙質を選択的に切削
MI(ミニマルインターベンション)

ステンレス材はスチール材よりも硬度が低い為軟化象牙質を的確に除去し、健全部位を過剰に削りすぎません。

サイズ	最大径	サイズ	最大径
1/2	0.6mm	5	1.6mm
1	0.8mm	6	1.8mm
2	1.0mm	7	2.1mm
3	1.2mm	8	2.3mm
4	1.4mm	※34mmは#2と#6のみ	

22mm

28mm

34mm

※原寸大(#2)

■最高許容回転数: 22, 28mm: 1200 min⁻¹
: 34mm : 800 min⁻¹

3種類の長さにより、様々な臨床に。

28mm、34mmタイプは、アクセスが困難な隣接面、歯肉縁下の除去などの対応に。また、マイクロスコープを用いた臨床や見えにくい部位の視野確保に。

MIステンレスバーの使い方

低速回転で押し付けず、フェザータッチで使用。低速回転にすることで、柔らかい感染象牙質と健全象牙質の切削間隔の違いが感じやすくなります。切削感の違いという感覚にう触検知液を併用することで、感染象牙質をより選択的に除去することができます。

■最小包装単位: 6本入/ケース
■アソート: #1~6(22mm、28mm)

標準価格(6本入/ケース)

2025年6月時点の税抜価格

医療機器届出番号 09B1X00006001010
一般医療機器 一般的名称: 歯科用スチールバー 販売名 マニーステンレスバー

切削重視

STAINLESS BURS HARD ステンレスバー ハード

切れ味良好!切削性持続!

熱処理により硬度を上げ、高い切削性を実現しました。スチールバーと同等の切削性を持ち、予防的に健全歯質を切削することができます。

サイズ	最大径	サイズ	最大径
1/2	0.6mm	5	1.6mm
1	0.8mm	6	1.8mm
2	1.0mm	7	2.1mm
3	1.2mm	8	2.3mm
4	1.4mm		

22mm

28mm

※原寸大(#4)

■最高許容回転数: 4000 min⁻¹

症例

写真提供: 栃木県佐野市開業 えづら歯科クリニック 江面陽子先生

■最小包装単位: 6本入/ケース
■アソート: #1~6

標準価格(6本入/ケース)

2025年6月時点の税抜価格

医療機器届出番号 09B1X00006001020
一般医療機器 一般的名称: 歯科用スチールバー ハード 販売名 マニーステンレスバー

⚠ EDTA溶液、次亜塩素酸ナトリウム等の腐食性溶液に長時間侵漬した場合、腐食の恐れがあるのでご注意ください。また、もらいサビにご注意ください。
⚠ 製品ご使用前に電子添文を必ずお読みください。

製造販売 **マニー株式会社**

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8-3
【デンタル営業】Tel: 028-667-8591 / Fax: 028-667-8593
URL: <https://www.mani.co.jp/>

発売 **株式会社モリタ**

大阪本社 ■ 〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3丁目33番18号 Tel: 06-6380-2525
東京本社 ■ 〒110-8513 東京都台東区上野2丁目11番15号 Tel: 03-3834-6161