


MANI

The best quality in the world,
to the world.



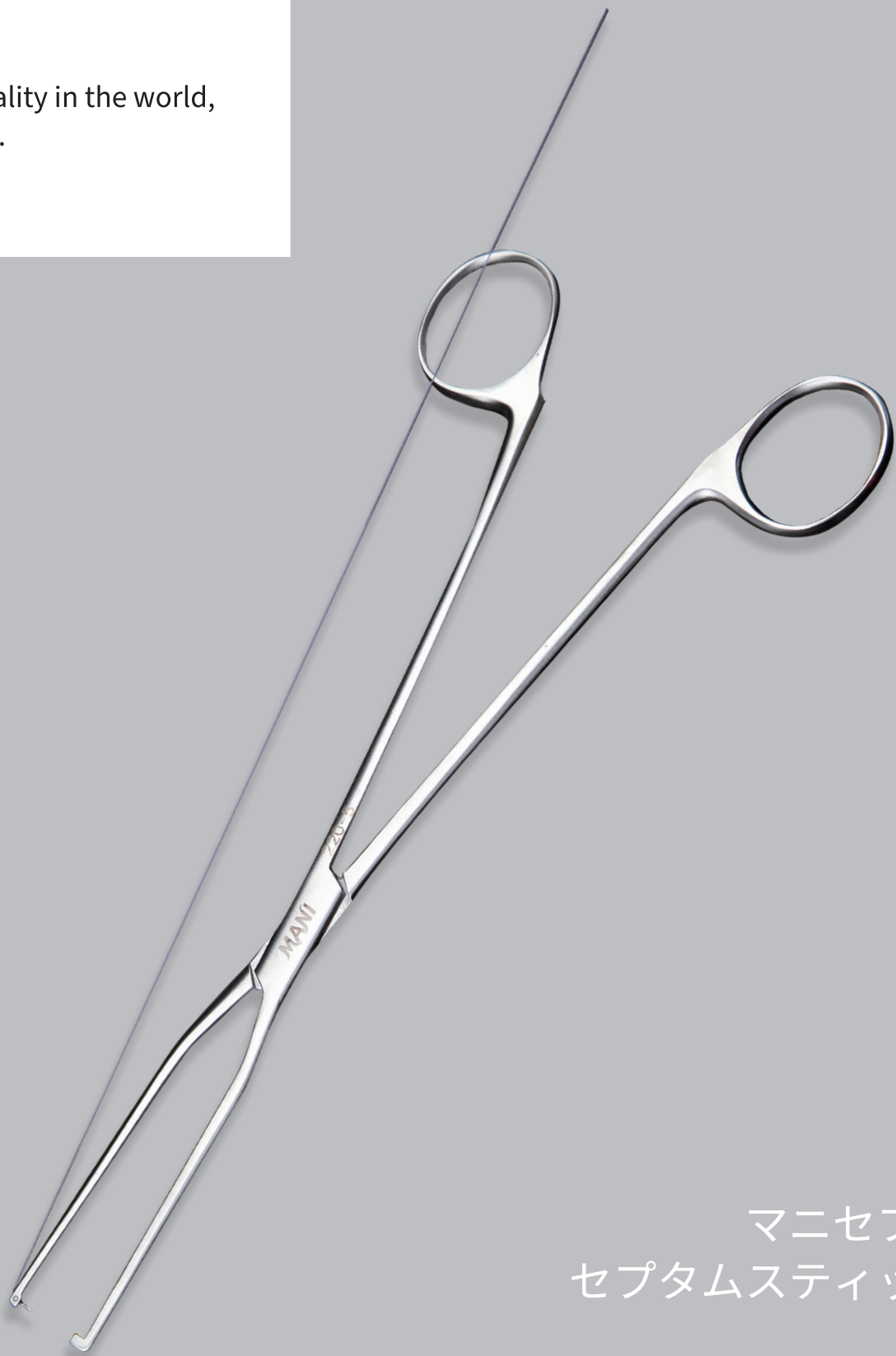


マニセプス
セプタムスティッチ

マニセプス セプタムスティッチ

セプタムスティッチは先端を閉じるだけで組織に縫合糸が刺通できます。
狭いスペースでも縫合が可能です。

先端の動き

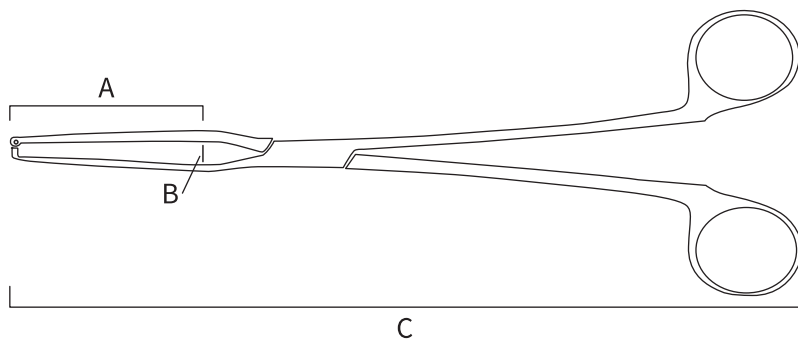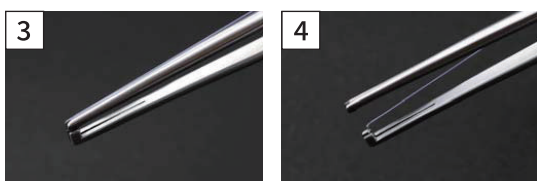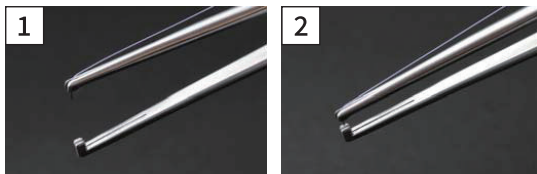

品番	品名	A	B	C
220-5	セプタムスティッチ	55mm	6mm	220mm


※専用滅菌済針付縫合糸は別売りです。

販売名 マニセプス
一般名称 持針器


医療機器届出番号 09B1X00006016010
医療機器のクラス 一般医療機器 (I)

セプタムスティッチ使用方法


狭いスペースでも縫合が可能です。

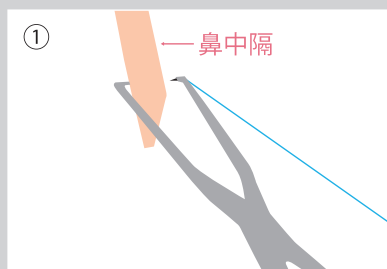


① 針を送針部にセットし、セプタムスティッチの先端で鼻中隔を挟むように鼻腔に挿入します。

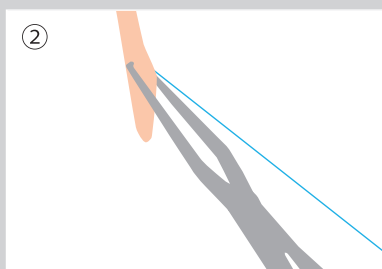


② セプタムスティッチの先端を閉じます。強く狭み過ぎると鼻中隔を損傷しますのでご注意ください。

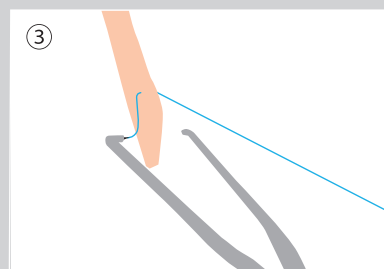


③ 針が受針部へ移動したのを確認しながら、セプタムスティッチを開き、器具を術者側に引き寄せます。

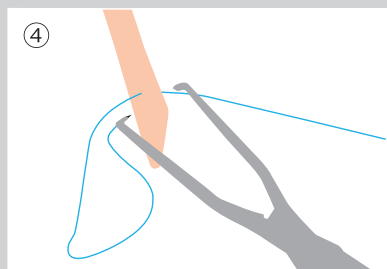

④ 受針部に移動した針を再び最初の位置 (送針部) に付け直します。

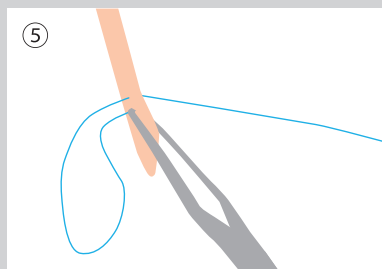

⑤ ①～③と同じ要領で、針を逆方向に鼻中隔に通します。

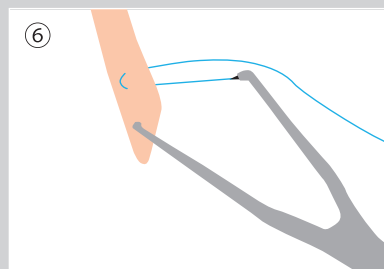

⑥ 鼻中隔への糸の刺通が完了します。

ご使用前に必ず電子添文をお読みください。

製造販売元 マニー株式会社

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8番3
TEL: 028-667-9911 / FAX: 028-667-6177
E-mail: opt@mani.inc / URL: www.mani.co.jp



デザイン・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

S0023