



製 品	サイズ	テーパー	長 さ	入 数	標準価格
Dファインダー	08、10、12、15	02	21mm、25mm	6 本	3,100円
グライドファインダー		02 - 03			2,500円



製 品	サイズ	テーパー	長 さ	入 数	標準価格
JIZAI Pre 013	013	04	21mm、25mm	3 本	6,000円
JIZAI Pre 020	020				

ケースレポートをご覧ください

貫通
ケースレポート

グライドパス
ケースレポート

医療機器届出番号：09B1X00006011050 一般医療機器 一般の名称：歯科用ファイル 販売名：マニーDファインダー
 医療機器届出番号：09B1X00006011010 一般医療機器 一般の名称：歯科用ファイル 販売名：マニーKファイル
 医療機器認証番号：301ABBZX00035000 管理医療機器 一般の名称：電動式歯科用ファイル 販売名：マニーNiTiファイル

製造販売 マニー株式会社

発売 株式会社モリタ

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8番3
 【デンタル国内営業】Tel: 028-667-8591 / Fax: 028-667-8593
 URL: <http://www.mani.co.jp/>
 大阪本社 ■ 〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3丁目33番18号 Tel: 06-6380-2525
 東京本社 ■ 〒110-8513 東京都台東区上野2丁目11番15号 Tel: 03-3834-6161

Your Endodontic Compass
 to find the right Path
 -from Patency to Glide Path-



Healthy teeth, happy smiles,
 to the world.



診 断

天蓋除去

根管口
明示

穿 通

グライドパス

拡大形成

洗 浄

充 填


歯冠修復

Your Endodontic Compass to find the right Path

- どんな症例でも迷わずに穿通、グライドパスができることを目指して -

穿 通

D ファインダー

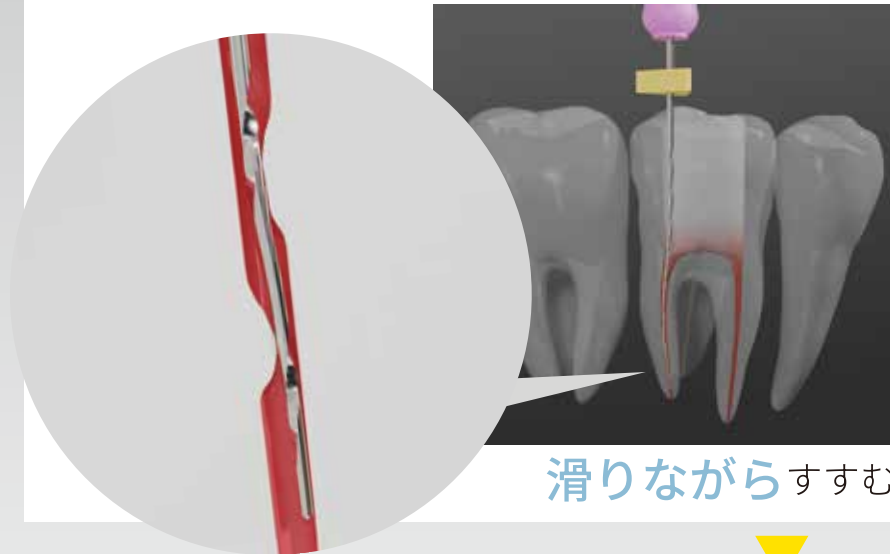


滑りながらすすむ



切削力を抑えているため、刃が食い込みにくく、レジ・パーフォレーションを起こしにくい。

最初は
Dファインダー

グライドファインダー

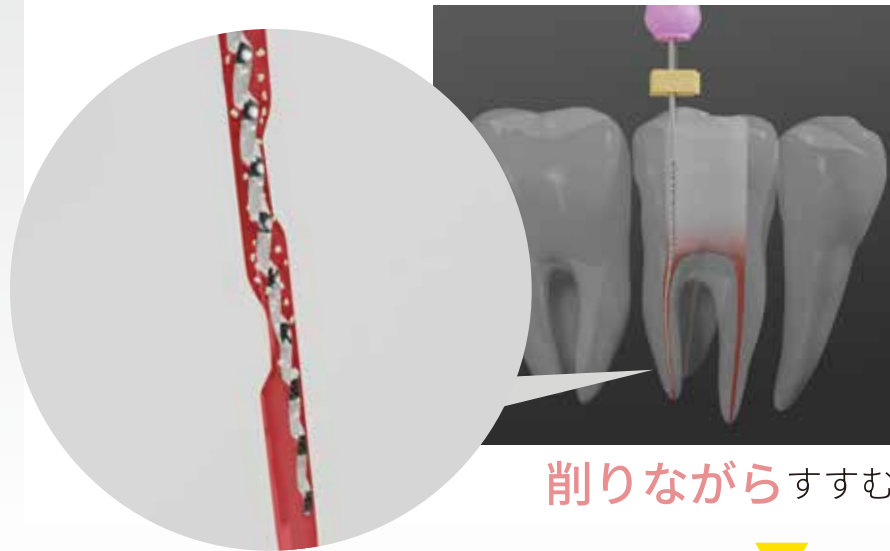

削りながらすすむ



進まない時は
グライドファインダー

切削力があるため、過度に石灰化・狭窄した根管でも、削りながら穿通ができる。

グライドパス

JIZAI Pre 013 / Pre 020

JIZAI Pre 013




正回転：許容回転数：300min⁻¹以下 トルク設定値：1.0N・cm 以下
※OTR モード 回転数：300min⁻¹以下 トルク：1.0N・cm 以下

JIZAI Pre 020



石灰化・狭窄、湾曲した根管の場合

正回転：許容回転数：500min⁻¹以下 トルク設定値：3.0N・cm 以下
※OTR モード 回転数：500min⁻¹以下 トルク：1.0N・cm 以下

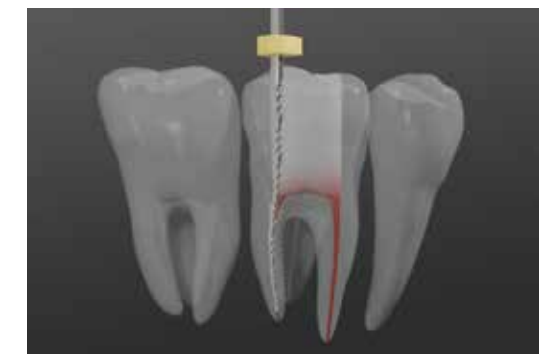

Preシリーズ独自の断面形状により、破折リスクを低減しつつ、根管形態を維持した形成ができる。

※トライオートZX2, ZX2+は、株式会社モリタ製作所の製品です。OTRモード及び設定値の詳細については、本製品の製造販売業者にご確認ください。
販売名：トライオートZX2 一般名称：歯科多目的治療用モータ 医療機器の分類：管理医療機器 特定保守管理医療機器 医療機器認証番号：228AHBZX00040000 製造販売：株式会社モリタ製作所