

より安全、より快適な、操作性の追求

jizai
— 自在 —

NiTi ロータリーファイル



根管治療の悩みを解決するために

日々の治療において、より安全・より快適に使用できるファイルを追求め、私たちは「操作性」、「耐久性」、「追従性」をキーワードに、弯曲根管へのアプローチに信頼できるサポートを提供することが、皆さまの負担軽減と安心につながるように。


デザイン

引き込まれを大幅に軽減した操作性

番手によって適切な断面形状を付与しています。



使用方法

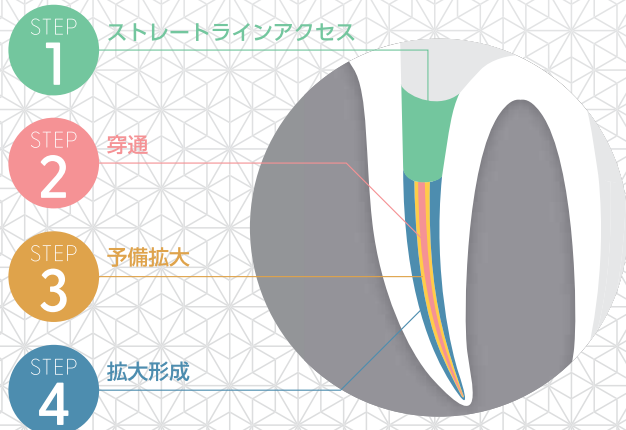



- ・ペッキングモーションで使用する。
- ・ファイルの交換ごとに洗浄・リキャピチュレーション(#10)を行う。
- ・フルレンジス法で使用する。



ドに“JIZAI”を開発いたしました。

破折への不安解消 を目指した耐久性

熱処理によって適切な柔軟性を付与しているため、疲労破折を起こしにくい。
金属の模擬根管模型の中で、何回転 すると折れるかという試験を行っている。
(条件:500min⁻¹)

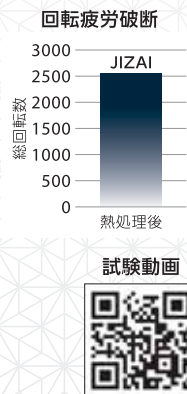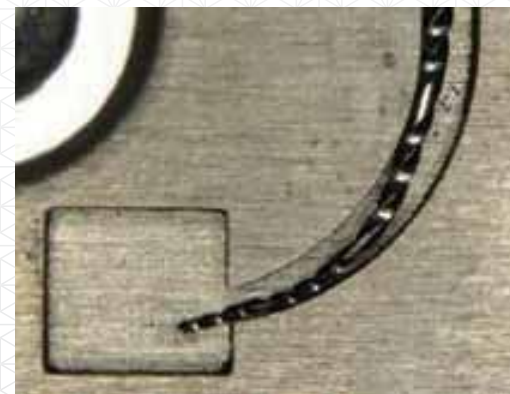

複雑根管の治療をサポート する追従性


複雑な形状でも外弯・内弯に偏らない形成をサポート。



STEP
2

穿通

0 02)

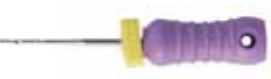

または

ー (010 03-02)



根管にはガイドファインダーを使用

STEP
3

予備拡大(グライドパス)

JIZAI Pre 013(013 04)

■正回転 許容回転数:300min⁻¹以下 トルク設定値:1.0N・cm以下
※OTRモード 回転数:300min⁻¹以下 トルク:1.0N・cm以下



石灰化・狭窄、弯曲した根管の場合

JIZAI Pre 020(020 04)

■正回転 許容回転数:500min⁻¹以下 トルク設定値:3.0N・cm以下
※OTRモード 回転数:500min⁻¹以下 トルク:1.0N・cm以下



STEP
4

拡大形成

JIZAI I(025 04) / JIZAI II(025 06) / JIZAI III(035 04)

■正回転 許容回転数:500min⁻¹以下 トルク設定値:3.0N・cm以下
※OTRモード 回転数:500min⁻¹以下 トルク:1.0N・cm以下



JIZAI製品ラインナップ マルチプルユース

規格	サイズ	テーパー	長さ	入数	標準価格
グライドバスケット					
オリフィスオープナー	025	14	18mm	各1本入	6,000円
Pre 013	013	04	21mm 25mm		
Pre 020	020	04			
シェイピングキット					
I	025	04	21mm 25mm	各1本入	6,000円
II	025	06			
III	035	04			

医療機器認証番号：301ABBZX00035000 管理医療機器 一般の名称：電動式歯科用ファイル 販売名：マニー NiTi ファイル

規格	サイズ	テーパー	長さ	入数	標準価格
単品					
オリフィスオープナー	025	14	18mm	3本入	6,000円
Pre 013	013	04	21mm 25mm		
Pre 020	020	04			
025 04	025	04			
030 04	030	04			
035 04	035	04			
040 04	040	04			
045 04	045	04			
050 04	050	04			
025 06	025	06			
030 06	030	06			
035 06	035	06			



サイズ識別

ラバーストッパーカラー ■18mm □21mm ■25mm



カラーコード ■Pre 013 ■Pre 020 ■025 ■030 ■035 ■040 □045 ■050

関連製品



Dファインダー

サイズ 08,10,12,15
長さ 21mm, 25mm

医療機器届出番号:09B1X00006011050
一般医療機器
一般の名称:歯科用ファイル
販売名:マニー Dファインダー



グライドファインダー

サイズ 08,10,12,15
長さ 21mm, 25mm

医療機器届出番号:09B1X00006011010
一般医療機器
一般の名称:歯科用ファイル
販売名:マニー Kファイル

製造販売 マニー株式会社

発売 株式会社モリタ

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地 8 番 3
【デンタル国内営業】 Tel.028-667-8591 / Fax.028-667-8593

大阪本社 〒564-8650 大阪府吹田市垂水町 3 丁目 33 番 18 号 Tel:06-6380-2525
東京本社 〒110-8513 東京都台東区上野 2 丁目 11 番 15 号 Tel:03-3834-6161